

# Ideální volba pro rekonstrukci prsu

Tkáňový expandér/prsní implantát **Becker** s povrchovou texturou **Siltex™**




# Veškeré výhody prsního expandéru a implantátu v jednom

## Dokonalé spojení

Pro pacientky i pro chirurgy je cílem rekonstrukce prsu maximálně esteticky uspokojivý výsledek s minimálním počtem operací potřebných k jeho dosažení. Tkáňový expandér/prsní implantát Becker je navržen tak, aby v podobě expandéru, který se jedinečným způsobem promění na trvalý implantát, splňoval oba cíle. V současnosti není na trhu k dispozici žádný jiný produkt, který v sobě spojuje takovou všestrannost s jednoduchostí a komfortem pro pacientku.


## Více funkcí v jediném produktu

Tkáňový expandér/prsní implantát Becker má dvě nezávislá pouzdra, což umožňuje spojit dotekové výhody gelu s objemovou flexibilitou fyziologického roztoku. Různorodost tvarů optimalizuje možnost zajistit každé pacientce vzhledově přirozené implantáty s velikostí na míru. Díky jednoduchosti pooperačních úprav tkáňového expandéru/prsního implantátu Becker je zajištěna kontrola objemu implantátu, která umožňuje dosáhnout symetrie. Tato exkluzivní kombinace výhod často zkracuje dobu operace a redukuje nutnost dodatečných zákroků.

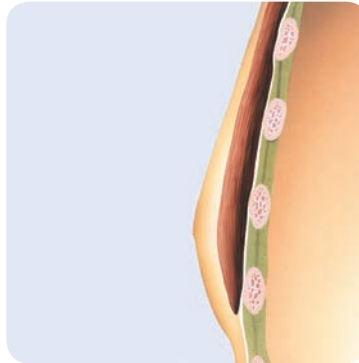


### Krok 1 Stav před implantací

Pacientka před okamžitou nebo odloženou rekonstrukcí.

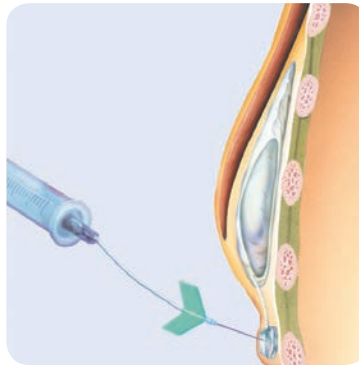


### Krok 2 Umístění tkáňového expandéru/implantátu Becker

Expandér se naplní požadovaným množstvím fyziologického roztoku. Injekční ventil je připojen k plnicí trubičce a umístěn pod kůží. Řez se uzavře.

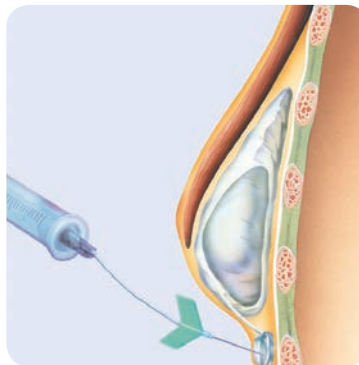

### Krok 3 Expanze implantátu fyziologickým roztokem

Injekcí přes kůži do injekčního ventilu. Dle potřeby se přidává více fyziologického roztoku, čímž se postupně expanduje kůže.

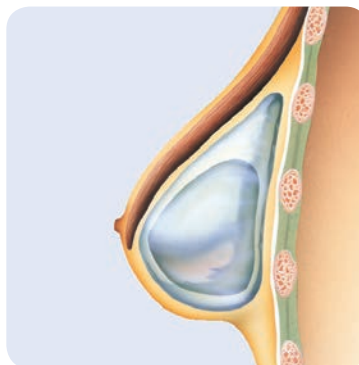

### Krok 4 Dosažení konečného objemu

Jednoduchým zákrokem se odstraní injekční ventil a plnicí trubička. Proveďte se rekonstrukce bradavky.

# Tři styly, nespočet možností

Expandéry/implantáty Becker od společnosti Mentor jsou dnes na trhu jediné kombinované tkáňové expandéry/dlouhodobé implantáty s možností pooperačních úprav. Lze je použít pro jednorázové okamžité rekonstrukce prsou, ale jsou vhodné i pro dvoufázové odložené rekonstrukce nebo pro augmentace. Tkáňový expandér Becker

s patentovaným systémem ventilu umožňuje upravovat konečné objemy, čímž napomáhá dosažení symetrie při jednostranných i oboustranných operacích. Každá velikost implantátu nabízí širokou škálu objemů finální náplně, čímž se minimalizuje nutnost nadbytečných skladových zásob.

## Siltex™ Contour Profile® Becker 35 s exkluzivním anatomickým tvarem

Tvarovaná vnější dutina tvoří 35% objemu expandéru, je předem vyplněna silikonovým gelem. Tvarovaná vnitřní dutina je připevněna na zadní straně k vnější dutině, což zabraňuje rotaci. Prázdná vnitřní dutina představuje 65% konečného nominálního objemu, který lze upravovat během doporučeného šestiměsíčního plnicího období. **Přeplnění je možné až o 25% nominálního plnicího objemu.**



## Siltex Round Becker 25

Vnější dutina tvoří 25% objemu expandéru, je předem vyplněna silikonovým gelem. Prázdnou vnitřní dutinu lze naplnit fyziologickým roztokem až do 75% konečného nominálního objemu implantátu. **Přeplnění je možné až o 50% nominálního plnicího objemu.**



## Siltex Round Becker 50

Jediný, na trhu dostupný expandér/implantát s poměrem 50% gelu a 50% fyziologického roztoku. Vnější dutina tvoří 50% objemu expandéru, je předem vyplněna silikonovým gelem, zatímco vnitřní dutina určená pro fyziologický roztok je prázdná a lze ji postupně naplňovat za účelem úpravy velikosti a rozměrů. **Extremně přizpůsobitelný implantát**, který se opět vyznačuje řadou různých objemů fyziologického roztoku.



# Tkáňový expandér/prsní implantát Becker s povrchovou texturou Siltex™

## Siltex™ Round Becker 25, Cohesive I™

(25% silikonový gel, kohesivita I ve vnější dutině, 75% fyziologický roztok ve vnitřní dutině)

Vol.	Gel Vol.	DOČASNÉ PŘEPLNĚNÍ		Total Saline	Total Gel-Saline	Diam.	Proj.	Cat.#
		Max Saline	Total Gel-Saline					
150 cc	40 cc	185 cc	225 cc	85-150 cc	125-190 cc	10,7 cm	2,4 cm	354-1500
200 cc	50 cc	250 cc	300 cc	125-200 cc	175-250 cc	11,6 cm	2,7 cm	354-2000
250 cc	60 cc	315 cc	375 cc	165-255 cc	225-315 cc	12,1 cm	3,0 cm	354-2500
300 cc	75 cc	375 cc	450 cc	200-300 cc	275-375 cc	12,9 cm	3,0 cm	354-3000
350 cc	90 cc	435 cc	525 cc	235-350 cc	325-440 cc	13,5 cm	3,0 cm	354-3500
400 cc	100 cc	500 cc	600 cc	275-400 cc	375-500 cc	13,7 cm	3,4 cm	354-4000
500 cc	125 cc	625 cc	750 cc	350-500 cc	475-625 cc	14,7 cm	3,7 cm	354-5000
600 cc	150 cc	750 cc	900 cc	425-600 cc	575-750 cc	15,6 cm	4,2 cm	354-6000
700 cc	175 cc	875 cc	1050 cc	500-700 cc	675-875 cc	16,8 cm	4,3 cm	354-7000
800 cc	200 cc	1000 cc	1200 cc	575-800 cc	775-1000 cc	17,2 cm	4,6 cm	354-8000

## Siltex™ Contour Profile® Becker 35, Cohesive II™

(35% silikonový gel, kohesivita II ve vnější dutině, 65% fyziologický roztok ve vnitřní dutině)

Vol.	Gel Vol.	DOČASNÉ PŘEPLNĚNÍ		Total Saline	Total Gel-Saline	Width	Height	Proj.	Cat.#
		Max Saline	Total Gel-Saline						
145 cc	50 cc	120 cc	170 cc	85-95 cc	135-145 cc	9,5 cm	8,3 cm	4,2 cm	324-0955
195 cc	70 cc	155 cc	225 cc	110-125 cc	180-195 cc	10,5 cm	9,1 cm	4,6 cm	324-1055
255 cc	90 cc	205 cc	295 cc	145-165 cc	235-255 cc	11,5 cm	10,0 cm	5,1 cm	324-1155
290 cc	100 cc	235 cc	335 cc	170-190 cc	270-290 cc	12,0 cm	10,5 cm	5,3 cm	324-1205
325 cc	110 cc	270 cc	380 cc	190-215 cc	300-325 cc	12,5 cm	10,9 cm	5,5 cm	324-1255
365 cc	125 cc	300 cc	425 cc	215-240 cc	340-365 cc	13,0 cm	11,3 cm	5,7 cm	324-1305
400 cc	130 cc	335 cc	465 cc	240-270 cc	370-400 cc	13,5 cm	11,8 cm	5,9 cm	324-1355
460 cc	160 cc	375 cc	535 cc	270-300 cc	430-460 cc	14,0 cm	12,2 cm	6,2 cm	324-1405
565 cc	195 cc	460 cc	655 cc	330-370 cc	525-565 cc	15,0 cm	13,1 cm	6,6 cm	324-1505
685 cc	240 cc	555 cc	795 cc	400-445 cc	640-685 cc	16,0 cm	13,9 cm	7,0 cm	324-1605

## Siltex™ Round Becker 50, Cohesive I™

(50% silikonový gel, kohesivita I ve vnější dutině, 50% fyziologický roztok ve vnitřní dutině)

Vol.	Gel Vol.	Total Saline	Total Gel-Saline	Diam.	Proj.	Catalog #
300 cc	150 cc	150-200 cc	300-350 cc	12,9 cm	3,0 cm	354-1515
400 cc	200 cc	200-300 cc	400-500 cc	13,9 cm	3,4 cm	354-2020
500 cc	250 cc	250-350 cc	500-600 cc	14,7 cm	3,7 cm	354-2525
600 cc	300 cc	300-425 cc	600-725 cc	15,6 cm	4,2 cm	354-3030
700 cc	350 cc	350-500 cc	700-850 cc	16,0 cm	5,0 cm	354-3535

## Injekční ventily

**Popis** **Katalogové číslo**  
 Komplet injekčních ventilů a 23 G jehly 350-DOMPCK  
 Obsahuje standardní a mikro ventil, nerezový konektor a konektor True Lock®.



Standardní ventil






Mikro ventil



Nerezový konektor



True Lock® konektor

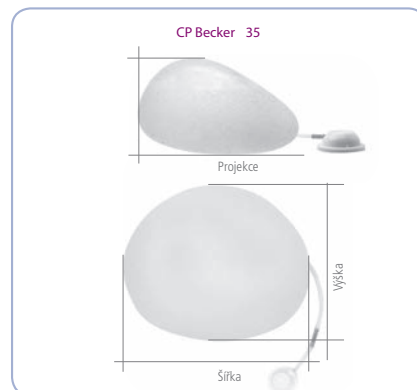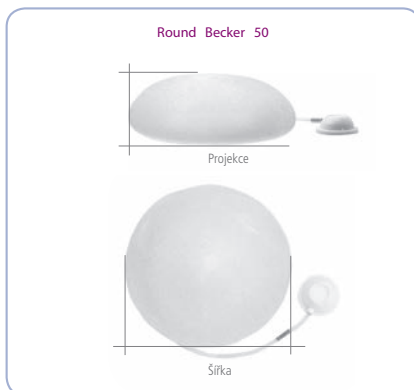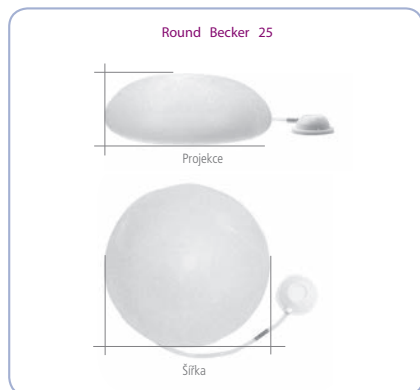

**Veškeré tkáňové expandéry/prsní implantáty Becker jsou dodávány v balení s injekčním ventilem a jehlou velikosti 23 G.**

Poznámka: Rozměry jednotlivých implantátů se mohou u tohoto typu produktů velmi lehce lišit. Ne všechny kusy budou přesně odpovídat rozměrům uvedeným výše.

### Důležité informace:

Prsní implantáty MemoryGel® jsou indikovány pro augmentaci prsou u žen od 18 let nebo pro rekonstrukci prsu. Zavádění prsních implantátů by se nemělo provádět u žen s nedolčenou infekcí v těle, se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny, nemocných rakovinou, které nebyly patřičným způsobem léčeny nebo jsou těhotné či kojící. Prsní implantáty nejsou produkty na celý život a jejich zavedení nemusí být nutně jednorázovou záležitostí.

Pacientky by měly dostat informace a být poučeny tak, aby porozuměly všem rizikům i přínosům spojeným s prsními implantáty a měly by mít před konečným rozhodnutím o operaci příležitost s vámi toto téma konzultovat.

Podrobné indikace, kontraindikace, upozornění a varování související s použitím prsních implantátů obsahujících MemoryGel® naleznete v technickém listu výrobku (Product Insert Data Sheet), který je dodáván s každým prsním implantátem nebo online na [www.mentorcorp.com](http://www.mentorcorp.com)



201 Mentor Drive  
 Santa Barbara, CA 93111 USA  
 Tel: +1 805 879 6000  
 Fax: +1 805 967 7108  
[www.mentorcorp.com](http://www.mentorcorp.com)

Výrobce:  
 Mentor Medical Systems B.V.  
 Zernikedreef 2  
 2333 CL Leiden  
 The Netherlands

Distributor pro  
 Českou republiku



MEDIMPLANT, s.r.o.  
 Údolní 8a  
 602 00 Brno  
 Česká republika

Tel.: +420 541 211 814  
 Fax: +420 549 211 674  
 E-mail: [medimplant@medimplant.cz](mailto:medimplant@medimplant.cz)  
[www.medimplant.cz](http://www.medimplant.cz)